




fonctionnement

MANUEL DE FONCTIONNEMENT


MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE TOILETTE SURÉLEVÉS DE LA SÉRIE SIGNATURE

MODÈLES: Siège 5 po 1640 / Siège 5 po avec bras 1645

AVERTISSEMENTS

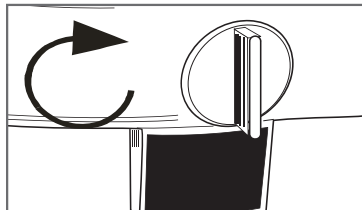

Ne jamais trop serrer les fixations car ceci risquerait d'endommager la cuvette ou le siège lui-même.

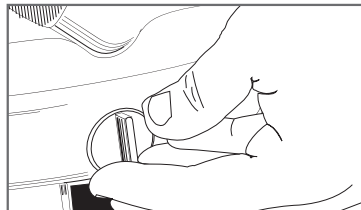

Vérifier chaque semaine que les fixations du siège surélevé sont bien serrées.




Ne poser le siège surélevé que sur une cuvette de toilette répondant aux spécifications. S'assurer que le siège repose bien sur la cuvette.




Ne pas dépasser la capacité de poids.
NE PAS UTILISER LE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!

ENTRETIEN ET UTILISATION

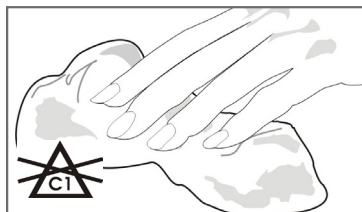

Ne pas utiliser de produits de nettoyage au chlore ou abrasifs. Pour nettoyer, essuyer avec un linge humide et un détergent doux seulement.

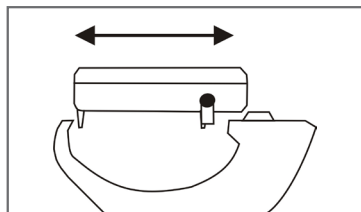

Ce siège de toilette surélevé ne convient que pour des cuvettes standard [dimensions approximatives 12¾ x 10¼ po/32 x 26cm].



Il est recommandé d'aider et de surveiller les utilisateurs dont la mobilité est limitée.

LIRE ATTENTIVEMENT TOUS AVERTISSEMENTS

GARDER CES INFORMATIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE


MONTAGE




Avant d'installer le siège de toilette surélevé, s'assurer que la cuvette est propre et sèche.




Aucun outil n'est nécessaire.

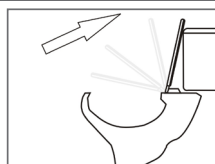


Lever le couvercle et le siège de toilette. Pour certaines cuvettes de toilette, il faudra peut-être enlever l'ensemble couvercle et siège pour une bonne installation.

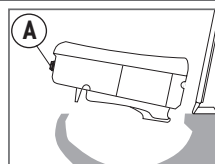

Placer le siège de toilette surélevé sur le rebord de la cuvette avec le bouton (A) orienté vers l'avant.

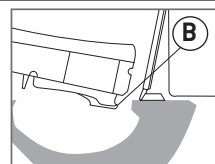

S'assurer que les rebords arrière (B) sont bien sous le bord arrière de la bordure de la cuvette.

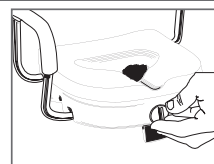

Serrer le siège de toilette surélevé en faisant tourner le bouton de réglage à la main dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. **NE PAS TROP SERRER!**

NOTE:

Pour enlever le siège de toilette surélevé tourner le bouton dans le sens antihoraire. Lever l'avant du siège de toilette surélevé jusqu'à ce qu'il soit séparé du bord de la cuvette puis le tirer vers l'avant et retirez.

GARANTIE

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:

613-723-6734



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.