




fonctionnement


MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE DOUCHE
MODÈLES: 1460 Siège de Douche / 1465 Siège de Douche avec Dossier

COMPOSANTS

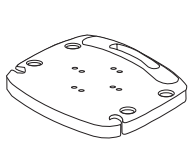

1 x Siège

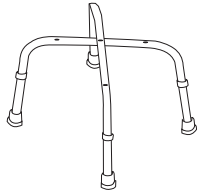

2 x Pieds
(Marqué ① et ②)



1 x Dossier
(Modèle #1465
Seulement)



4 x 42mm Vis
4 x Rondelles

1 x 50mm Vis
1 x Rondelle et
Rondelle de Blocage




NE PAS UTILISER AUCUNE PIÈCE SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!


LIRE ATTENTIVEMENT TOUS
AVERTISSEMENTS

GARDER CES INFORMATIONS POUR
FUTURE RÉFÉRENCE


AVERTISSEMENTS

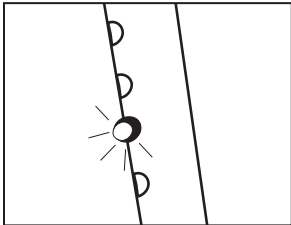


Vérifier que tous les boutons-poussoirs sont solidement en place avant de s'asseoir.

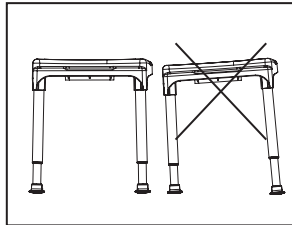

Vérifier que les pieds sont bien de niveau avant l'usage pour éviter les risque de blessure.

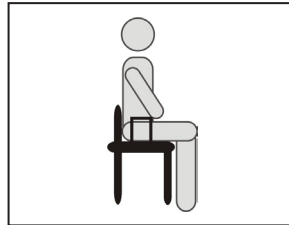

Ne pas se tenir debout sur le siège. Les pieds doivent bien reposer sur le sol quand on est assis.

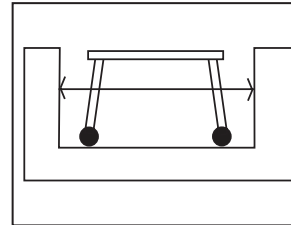


N'utiliser que sur des fonds de baignoire ou de douche assez grands pour assurer la stabilité des quatre pieds.



Ne pas dépasser la capacité de poids.


ENTRETIEN ET UTILISATION

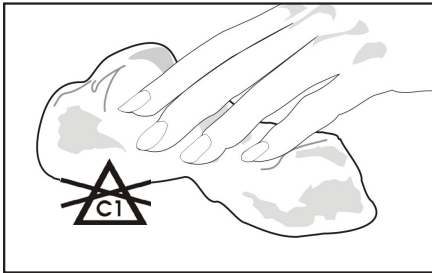


Ne pas utiliser de produits de nettoyage au chlore ou abrasifs. Nettoyer avec du savon ou un détergent doux. Bien rincer après chaque utilisation.




Il est recommandé d'aider et de surveiller les utilisateurs dont la mobilité est limitée.

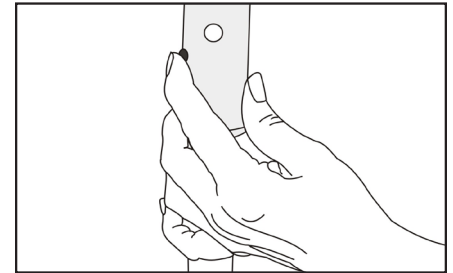


Vérifier périodiquement les pieds pour s'assurer que tous les boutons-poussoirs dépassent bien les trous de réglage des pieds.

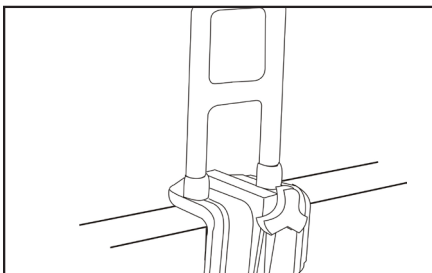

Augmenter la sécurité en utilisant un tapis antidérapant sous le siège. Les sièges de douche ne doivent pas être utilisés comme appui pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Utiliser une barre de sécurité de baignoire pour aider à s'asseoir au besoin.

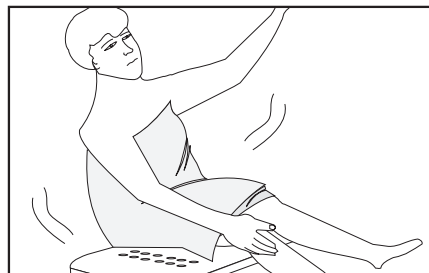

S'assurer que son poids est distribué uniformément quand on s'assied. Une charge mal répartie peut renverser le siège ou causer une chute.

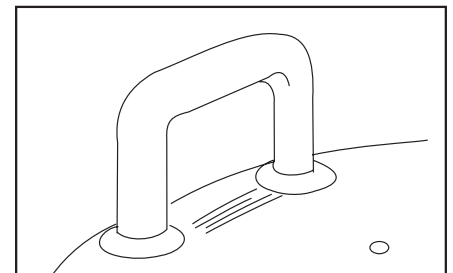

N'utiliser que les pièces et accessoires autorisés avec ce siège. **En vente séparément.**



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.




fonctionnement


MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE DOUCHE
MODÈLES: 1460 Siège de Douche / 1465 Siège de Douche avec Dossier

MONTAGE

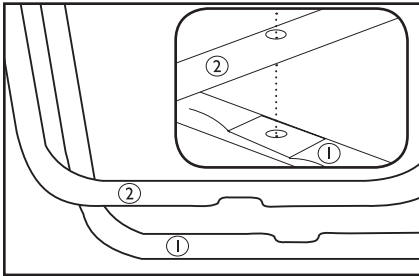


Les pieds sont marqués avec un numéro ① et numéro ②. Le siège est aussi marqué pour indiquer où le pied doit être placé.

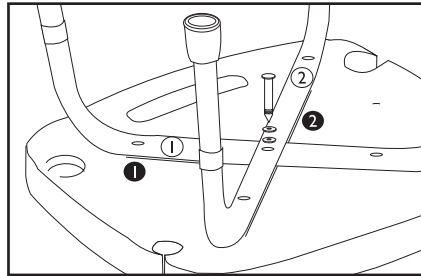


Rabattre le siège et insérer le pied marqué ① sur le siège tîret marquée ①. Insérer le pied marqué ② sur le siège tîret marquée ②. Visser la vis [50mm] de réglage et la rondelle dans le trou central.




Ne pas utiliser une perceuse - outils à main seulement!

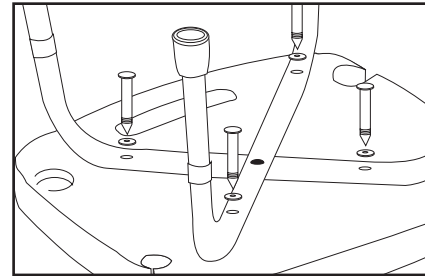


Visser les vis [42mm] dans les trous restants. **Attention: Ne serrez pas trop car cela va priver les trous dans le siège. Si la plus vis est utilisée sur l'un de ces quatre trous, elle fera saillie à travers le siège! Ceci annulera la garantie!**

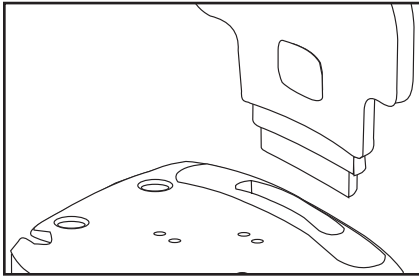

Rabattre le siège et insérer le dossier fermement en place en poussant dans la fente située sur le siège.

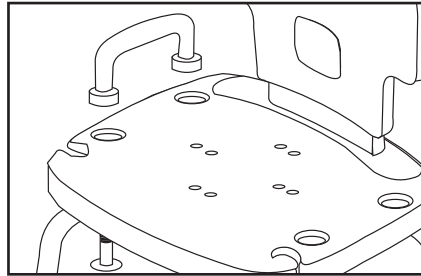

Positionner la poignée rouge dans les fentes situées sur le siège et le maintenir en place par tout en serrant la vis en dessous. La poignée rouge peut être ajouté à l'un ou d'autre côté.

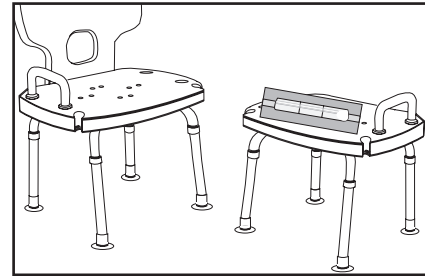

S'ASSURER QUE LE SIÈGE DE DOUCHE EST HORIZONTAL AVANT D'UTILISER!

POIGNÉE ROUGE EN VENTE SÉPARÉMENT



HUMAN CARE CANADA, INC.
10-155 rue Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:

613-723-6734



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.