



fonctionnement

MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE TOILETTE SURÉLEVÉS DE LA SÉRIE DE LUXE


MODÈLES:

Siège 2 po 1632


Siège 6 po 1636

Siège 4 po 1634

AVERTISSEMENTS

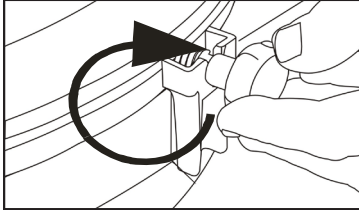

Ne jamais trop serrer les fixations car ceci risquerait d'endommager la cuvette ou le siège lui-même.

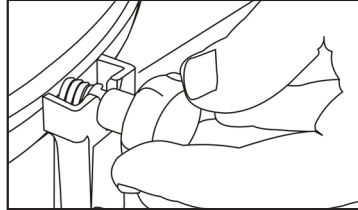

Vérifier chaque semaine que les fixations du siège surélevé sont bien serrées.




Ne poser le siège surélevé que sur une cuvette de toilette répondant aux spécifications. S'assurer que le siège repose bien sur la cuvette.




Ne pas dépasser la capacité de poids.

NE PAS UTILISER LE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!

ENTRETIEN ET UTILISATION

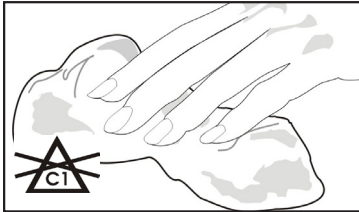

Ne pas utiliser de produits de nettoyage au chlore ou abrasifs. Pour nettoyer, essuyer avec un linge humide et un détergent doux seulement.

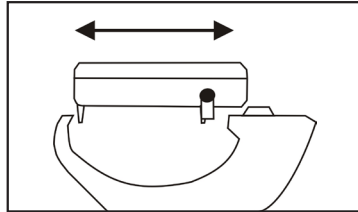

Ce siège de toilette surélevé ne convient que pour des cuvettes standard [dimensions approximatives 12¾ x 10¼ po/32 x 26cm].



Il est recommandé d'aider et de surveiller les utilisateurs dont la mobilité est limitée.


LIRE ATTENTIVEMENT TOUS AVERTISSEMENTS

GARDER CES INFORMATIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE


MONTAGE




Avant d'installer le siège de toilette surélevé, s'assurer que la cuvette est propre et sèche.

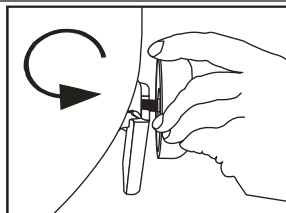


Tourner les boutons dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les supports soient complètement sortis.

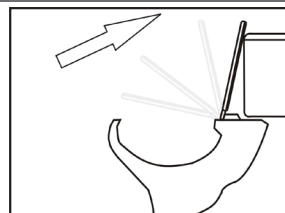

Lever le siège existant et placer le siège de toilette surélevé sur la cuvette. Pour le modèle n° 1637 il faut d'abord enlever le couvercle.

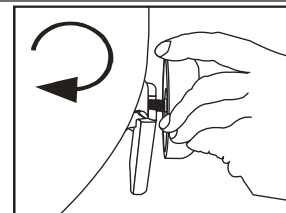

Tourner les boutons dans le sens horaire jusqu'à ce que les tampons de serrage appuient bien contre la cuvette. **NE PAS TROP SERRER!**

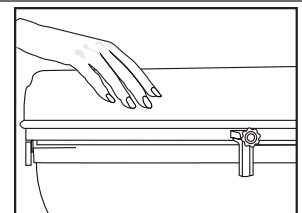

Vérifier le serrage de temps en temps.

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:

613-723-6734



HUMAN CARE CANADA INC.
10-155 Rue Colonnade
Ottawa, ON K2E 7K1

FABRIQUÉ EN CHINE



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.