




# fonctionnement

## MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DE PLANCHE DE TRANSFERT  
MODÈLES: 1495

### COMPOSANTS

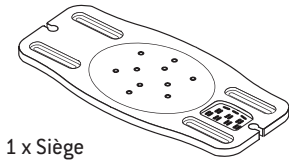

1 x Siège



4 x Repose-Pieds



4 x Vis



8 x Coussinets de caoutchouc




**NE PAS UTILISER AUCUNE PIÈCE SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!**


**LIRE ATTENTIVEMENT TOUS AVERTISSEMENTS**

**GARDER CES INFORMATIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

### AVERTISSEMENTS

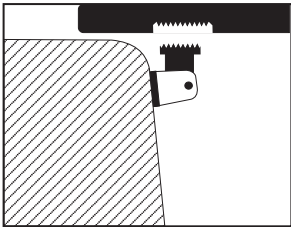


**Aligner** les repose-pieds dans les rainures avec les dents avant de serrer les repose-pieds durant le montage.

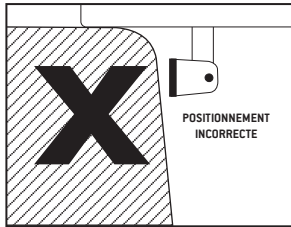

**S'assurer** que le repose-pieds repose bien contre la surface de la baignoire avant l'usage pour éviter les risques de blessure.



**Ne pas** se tenir debout sur le banc ni se laisser tomber dessus. Les jambes doivent toucher fermement le sol quand la personne est assise.

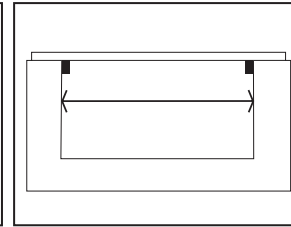


**N'utiliser** que sur une baignoire assez large pour assurer la stabilité des quatre repose-pieds.



**Ne pas** dépasser la capacité de poids.


### ENTRETIEN ET UTILISATION

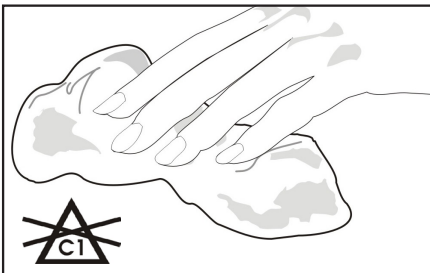


**Ne pas** utiliser de produits de nettoyage au chlore ou abrasifs. Nettoyer avec du savon ou un détergent doux. Bien rincer avant de réutiliser.




**Il est recommandé** d'aider et de surveiller les utilisateurs dont la mobilité est limitée.

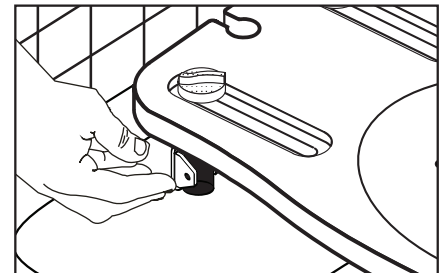


**Vérifier** périodiquement les tampons antidérapants et les repose-pieds pour s'assurer qu'ils sont bien en place avant l'usage.

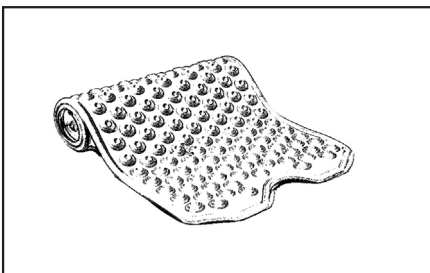

**Augmenter la sécurité** en utilisant un tapis antidérapant sous le siège.

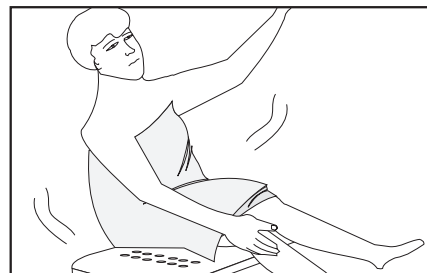

**S'assurer** que son poids est distribué uniformément quand on s'assied. Une charge mal répartie peut renverser le siège ou causer une chute.

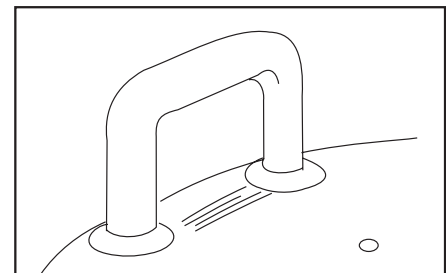

**N'utiliser** que les pièces et accessoires autorisés avec ce siège. **En vente séparément.**



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.



# fonctionnement

## MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DE PLANCHE DE TRANSFERT  
MODÈLES: 1495

### MONTAGE




**S'ASSURER QUE LA PLANCHE DE TRANSFERT EST HORIZONTALE ET QU'IL EST BIEN EN PLACE AVANT L'USAGE.**




**FAIRE BIEN ATTENTION SUR LES SURFACES MOUILLÉES.**




**NE PAS UTILISER AUCUNE PIÈCE SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!**

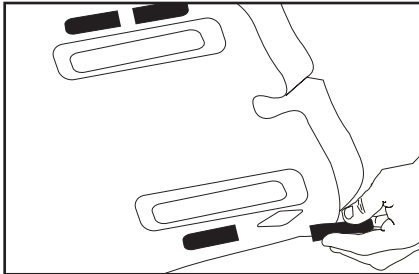


Placer les coussinets de caoutchouc dans la retenue qui se trouve au-dessous du planche de transfert et appuyer pour le mettre en place.

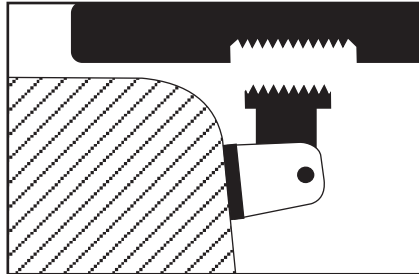


Mettre les dents du repose-pieds dans celle au-dessous du banc.

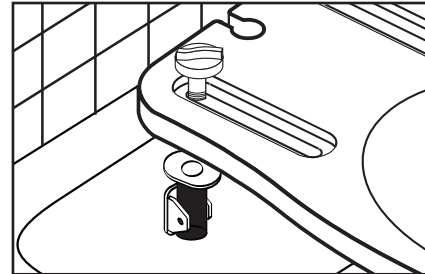


Fixer les repose-pieds en les vissant avec la vis en plastique sur le dessus du planche de transfert.

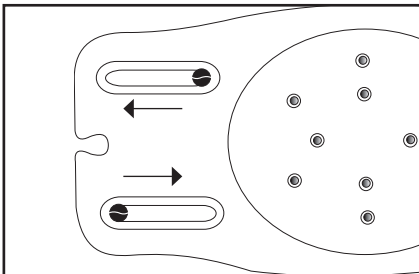

Ajuster les repose-pieds en fonction de la dimension de la baignoire en les glissant à la distance requise. Une fois à la bonne position, serrer les vis à la main.

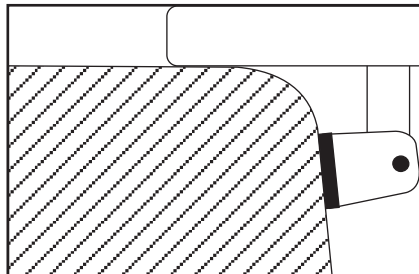

Ajuster le repose-pieds en pente en fonction de la surface de la baignoire. S'assurer qu'il s'ajuste bien contre les parois de la baignoire.

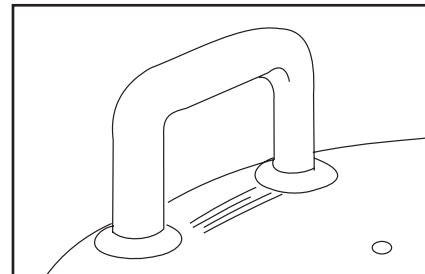

Positionner la poignée rouge dans les fentes situées sur la planche de transfert et le maintenir en place par tout en serrant la vis en dessous. La poignée rouge peut être ajouté à l'un ou d'autre côté.



**NE PAS TROP SERRER! Ceci risquerait de fausser les pas de vis et les trous dans le repose-pieds.**

**POIGNÉE ROUGE EN VENTE SÉPARÉMENT**



HUMAN CARE CANADA, INC.  
10-155 rue Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:

**613-723-6734**



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.