




# fonctionnement

## MANUEL DE FONCTIONNEMENT


MONTAGE ET UTILISATION DES POIGNÉES D'APPUI POUR BAIGNOIRE

MODÈLES: 1260 Grand / 1265 Régulier


### AVERTISSEMENTS

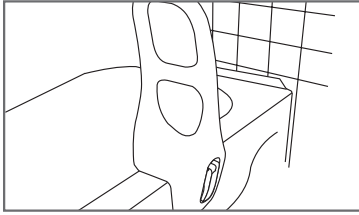

**Ne jamais** trop serrer la poignée d'appui pour baignoire car cela risque d'abîmer la baignoire ou la poignée.

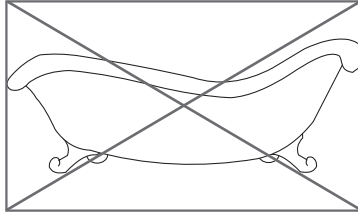

**Ne pas** poser la poignée d'appui pour baignoire sur une baignoire de plastique ou de fibre de verre. La poignée d'appui pour baignoire ne convient pas non plus pour les baignoires courbées.

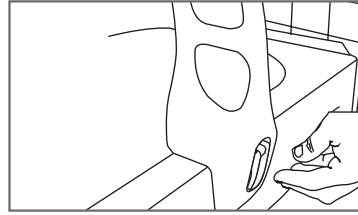

**Resserrer** la poignée d'appui pour baignoire chaque semaine pour assurer la sécurité de l'installation.




**Ne pas** dépasser la capacité de poids.  
**NE PAS UTILISER LA POIGNÉE D'APPUI POUR BAIGNOIRE SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!**


### ENTRETIEN ET UTILISATION




**Ne pas** utiliser de produits de nettoyage au chlore ou abrasifs. Nettoyer avec du savon ou un détergent doux. Bien rincer avant de réutiliser.

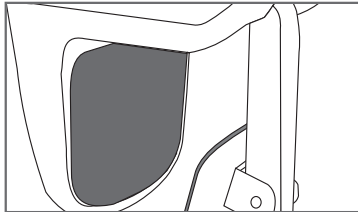

**Vérifier** périodiquement la poignée d'appui pour baignoire pour s'assurer que les tampons de caoutchouc sont bien fixés à la poignée.

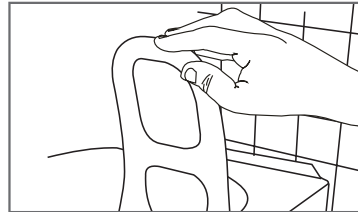


**Vérifier** que la poignée d'appui pour baignoire est bien en place avant chaque usage (elle devrait rester en place quand on appuie dessus ou qu'on la tire).

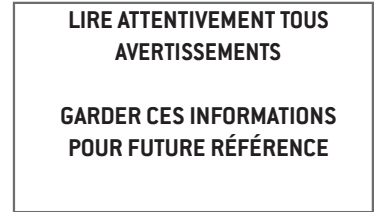


### MONTAGE




Avant d'installer la poignée d'appui pour baignoire, s'assurer que la baignoire est propre et sèche. La poignée peut être montée à l'une ou l'autre extrémité de la baignoire.

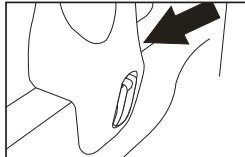


Choisir la section la plus plate de la paroi intérieure et extérieure de la baignoire. **Éviter** les parties courbées où la poignée d'appui pour baignoire ne peut pas se fixer correctement.

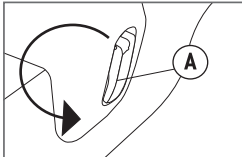

Tirer la poignée de réglage (A) pour l'utiliser comme levier. Tourner la poignée de réglage dans le sens antihoraire afin d'ouvrir suffisamment le dispositif de serrage pour l'adapter à la paroi de la baignoire.

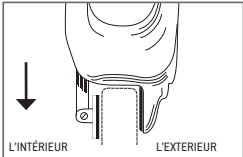

Placer la poignée pour baignoire sur la paroi de la baignoire en mettant la poignée de réglage vers l'extérieur de la baignoire.

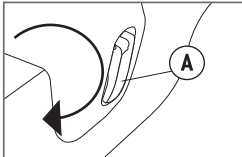

S'assurer que la poignée d'appui pour baignoire est bien fixée en position avant de serrer. Tourner la poignée de réglage (A) dans le sens horaire pour serrer. La poignée d'appui pour baignoire étant bien en place, replier la poignée de réglage pour qu'elle se verrouille en place.



Vérifier le montage en tirant la poignée d'appui pour baignoire vers l'avant, vers l'arrière et d'un côté à l'autre. Si la poignée d'appui pour baignoire se déplace, desserrer la poignée de réglage. Vérifier que la poignée de réglage n'est pas foirée et que les tampons ne sont pas desserrés. Si tout est correct, remettre en place à la position désirée et serrer.



**ATTENTION : Vérifier que la poignée d'appui pour baignoire est bien en place avant de l'utiliser si ce n'est pas le cas, elle risque de se desserrer et de causer des blessures.**

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:  
**613-723-6734**



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.