



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Monteringsanvisning

Droppställning

Art.nr 92907



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------|---|
| Monteringsanvisning | 1 |
| Allmän information..... | 3 |
| Droppställning | 3 |
| Motvikt..... | 4 |

Monteringsanvisning

SV

Art. nr: 92907

Den här monteringsanvisningen förklarar hur droppställningen ska monteras på

rollatorerna Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar RA och Rebel RA.

Allmän information

SV


Droppställningen passar till alla bredder av Carl-Oskar och Rebel, samt förstärkta modeller. Ställningen kan också monteras på Carl-Oskar RA och Rebel RA, men begränsar då positioneringen av underarmsstöden. Användning av droppställning på RA-rollatorer är därför beroende av hur underarmsstöden ska anpassas för brukaren.

Droppställningen är inte kompatibel med Carl-Oskar gåbord eller Rebel gåbord.

Droppställningen får ej belastas med mer än tre kilo. För maximal stabilitet, användarvänlighet och fallhöjd rekommenderas droppåsar med en liter när det finns tillgängligt.

Monteringsanvisning

SV

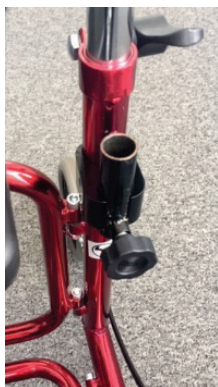

Montering av monteringsklämman.

Droppställning

1. Fäst monteringsklämman på det röda handtagsröret precis ovanför det övre av de två grindgångjärnen med rörfästet riktat framåt. Dra åt de två skruvarna ordentligt.
2. Ställ droppställningen i rörfästet så att droppställningen vilar med den utstickande axeln på rörfästets övre kant och dra åt det svarta vredet ordentligt.

3. Justera droppställningens höjd genom att

www.humancaregroup.com



Monteringsklämma.



Montering av
droppställning.



Placering av motvikter i
rollatorns främre grind.

lossa det svarta vredet och skjuta upp det inre röret. Skruva fast vredet igen när önskad höjd är inställd. Säkerställ god stabilitet.

Motvikt

4. På motsatt sida av droppställningen ska tre motvikter monteras på grinden. Lägg motvikterna på varandra och dra igenom ett buntband i varje hörn.

5. Håll viktpaketet i mellanrummet på den främre grindens kortsida och närmsta stag.

6. Spänn fast viktpaketet med buntbanden. Dra åt lite i taget så att viktpaketets position i förhållande till ramen kan justeras. Om rollatorn ska användas med korg bör viktpaketet justeras, för att undvika att det inte sticker upp över grindens ram. Klipp av överflödet på buntbanden.

På Rebel 57 och Carl-Oskar 57 är avståndet mellan grindens ram och stag mindre. På dessa modeller fästs en viktplatta fast på grindens ovsida, tillsammans med två vikter på grindens undersida.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm

Phone:- +46 8 665 35 00

Fax:- +46 8 665 35 10

E-post: info.se@humancaregroup.com

www.humancare.se

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone:- +1 613.723.6734

Fax:- +1 613.723.1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

Human Care USA Inc.

8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE AUSTRALIA

Unit 4, 49 Bertie Street

Port Melbourne, Victoria 3207

Phone:- +61 1300 132 736

Fax:- +61 (03) 9645 4954

Email: info.au@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE NETHERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577-412171

Fax: +31 577-412170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.