



Comfortabele pasvorm

Optimale ondersteuning

Veilige E-clips



## Geschikt voor vele tilsituaties

Onze Full Body Sling E-clip is een comfortabele tilband, die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden. Deze tilband voldoet in de meeste situaties, zelfs bij het tillen van de vloer.



De Full Body Sling E-clip biedt door zijn vorm een comfortabele ondersteuning aan het hoofd, de romp en bovenbenen, waardoor de cliënt een veilige houding ervaart. Deze tilband brengt de cliënt in een achterovergekeerde positie, die de druk op de cliënt's benen vermindert. Dit kan ook een prettige houding zijn voor cliënten met een verminderde rompbalans en/of met de neiging om te overstrekken. Deze gekantelde positie voorkomt tevens dat een cliënt uit de tilband glijdt. De geïntegreerde en verstevigde hoofdsteun maakt deze tilbands zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer. Deze tilbanden zijn ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk en zijn verkrijgbaar in twee materialen.

**Polyester net is een zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt.** Het heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam. De tilband kan kortere tijd achter de cliënt blijven. Extra voordeel is dat de tilband geschikt is voor douchen en baden.

**Het Soft Air Mesh materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende net stof.** Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft "two-way stretch"-eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

## Accessoires



**4-punts kanteljuk**  
voor plafondlift HeliQ,  
verkrijgbaar in Small  
(manueel), Medium en  
Large (elektrisch). Art. nr.  
92441, 92442 en 92443.



**4-punts kanteljuk**  
voor Diana II Comfort  
4ESB (elektrisch).  
Art. nr. 90560.



**4-punts kanteljuk**  
voor Diana II/  
Diana II Comfort  
4MSB (manueel),  
Art. nr. 90558/ 90559.



**Juk bekleding**  
Zachte bekleding voor  
juk. Art. nr. 50866.


## Gebruik



**Van en naar het bed**  
Geschikt voor het tillen  
vanaf een bed en gaan  
zitten op een bed.



**Van en naar een stoel**  
Geschikt voor positionering  
in een stoel en voor  
een transfers in en uit  
een stoel.

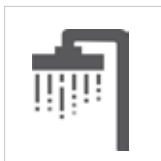


**Douchen**  
Polyester Net materiaal  
is geschikt voor natte  
omgeving.



**Van en naar het vloer**  
Ontworpen om op te tillen  
van de vloer.


## Kenmerken

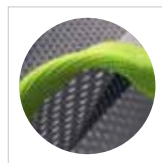

**Polyester Net**  
Zacht, dun materiaal dat  
ademt en snel droogt.  
Ideaal voor douchen en  
badderen. Art. nr. 25005C.



**E-clip ingebouwde borging**  
Eénhandig te bedienen.  
Universeel inzetbaar op  
alle liften die zijn uitgerust  
met paddenstoelbevestiging  
Ø 6,8-8,2 mm.

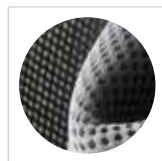


**Soft Air Mesh**  
Geweldig drukverlichtend  
effect. De druk is  
goed verdeeld binnen de  
3D-structuur van de stof.  
Voorkomt en beschermt.  
Art. nr. 25010C.



**Verzorgingsinstructies**  
Was- en verzorgingsinstructies  
op het label van  
de tilband. Gebruik een  
goedgekeurde waszak  
tijdens het wassen.

## Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Full Body Sling E-clip Net S*	25005C-S	Small		31 cm / 13.8"	85 cm / 30.3"	90 cm / 35.4"
Full Body Sling E-clip Net M*	25005C-M	Medium		40 cm / 15.7"	92 cm / 34.6"	91 cm / 35.8"
Full Body Sling E-clip Net L*	25005C-L	Large		40 cm / 17.3"	98 cm / 38.6"	100 cm / 39.3"
Full Body Sling E-clip Net XL*	25005C-XL	Extra Large		44 cm / 18.9"	105 cm / 41.3"	102 cm / 40.1"
Full Body Sling E-clip Net XXL*	25005C-XXL	Extra Large [2x]		44 cm / 18.9"	111 cm / 43.7"	106 cm / 41.7"
Full Body Sling E-clip Net XXXL*	25005C-XXXL	Extra Large [3x]		44 cm / 18.9"	118 cm / 46.4"	108 cm / 42.5"
	Maximaal gebruikers- gewicht:	250kg / 551lb				

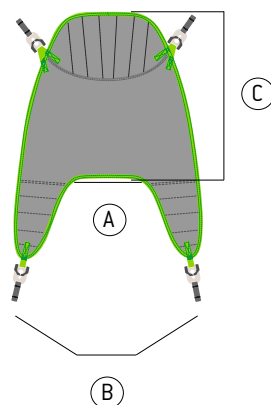

\* Ook verkrijgbaar in Soft Air Mesh materiaal, 25010-(size).

**”** We improve freedom of movement  
and quality of care for people.

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com